

羟丙基甲基纤维素喷鼻器说明书

名称:

中文名称: 羟丙基甲基纤维素喷鼻器

英文名称: Nasaleze

商品名: Nasaleze

成分:

98.5%的天然植物羟丙基甲基纤维素粉末和 1.5%的薄荷粉。

性状: 白色粉末。

适应症:

羟丙基纤维素喷于鼻粘膜上形成一种机械性阻碍层辅助减少过敏原等颗粒物的吸入量。

作用机制:

纤维素粉末进入气道后与水汽作用在鼻粘膜表面形成无色粘液样薄凝胶形成一种机械性阻碍层减少过敏原等颗粒物的吸入量,以减轻过敏症状。可在数分钟至数小时内缓解过敏性鼻炎的症状。

用法和用量:

每次使用前务请确实摇晃瓶身使内容物均匀。

1. 挤压瓶身,测知一次喷出约五厘米高粉雾所需力量。
2. 轻轻擤鼻子。
3. 呼气。
4. 以手指压住一个鼻孔。
5. 将 Nasaleze 瓶口伸入另一个鼻孔。
6. 快速挤压瓶身,送入 Nasaleze 一次剂量,同时轻轻将其吸入。
7. 稍等两秒,后轻轻吸入 Nasaleze 粉末至其深入鼻腔后,对另一个鼻孔重复 3-7 的步骤。
8. 视需要可多次使用! Nasaleze 粉末为纯天然纤维素,不含任何活性成分。发挥 Nasaleze 最大功效的关键是确保鼻腔粘膜上保持固定的粉末层,在过敏原和敏感的鼻腔粘膜间形成隔离屏障—这样,机体天然防御系统不会启动释放组胺,因而避免了典型的过敏性鼻炎的流鼻水、打喷嚏和眼痒等症状。

9. 进入充满过敏原的环境如人群拥挤场所、机舱、花园或清扫前先使用 Nasaleze。

10. 每次擤鼻子之后,务必请再次使用 Nasaleze。

禁忌症: 尚无禁忌症。

药物相互作用:

Nasaleze 不含任何抗组胺药、激素和其他药物,适用于老年、成人、孕妇、哺乳期妇女和 2 岁以上儿童。

注意事项:

1. 请勿使用封条残破或已打开过的新品;用后务请确实盖紧并放回干燥处;开封后,请在 3 个月内用毕。
2. 若粉末不慎喷入眼睛,用清水冲洗。
3. 请不要和其他喷鼻剂混合使用,以免降低产品的效能。
4. 本产品超量使用不会造成不良后果,但使用不当会达不到预期效果。
5. 儿童必须在成人指导下使用。
6. 对产品中所含成分过敏的患者应禁止使用。

不良反应: 目前尚未出现不良反应。

规格: 500mg/瓶

贮藏: 阴凉干燥处保存。

包装规格: 1 瓶/盒

有效期: 3 年。

注册产品标准: YZB/ENG xxxx-xxxx

注册产品注册证: 国食药监械(进)字 xxxx 第 xxxxxxxx 号

制造商: Nasaleze Ltd.

制造商地址: Unit 6, The Shipyard, Ramsey, Isle of Man, IM8 3DT, UK

售后服务机构: 上海领检科技有限公司

售后服务机构地址: 上海市祖冲之路 2277 弄世和国际中心 8 幢 201203

售后服务机构联系方式: 021-68537729 68537761